

Le Système Avertisseur Central **NEMA-4**



Les Caractéristiques :

- Chaque module est commandé par un microprocesseur individuel
- En configuration standard, jusqu'à 20 légendes.
- Lumières LED de longue durée
- Mode entretien pour dépannage facile
- Circuit d'auto surveillance pour plus de fiabilité
- Mises à niveau sur place des modules pour une connexion avec un système de gestion de l'immeuble ou le AIMS
- Le grognard d'alarme atteint plus de 90 décibels
- Les modules sont montés sur un châssis à charnières pour un meilleur accès
- La dernière alarme clignote rouge alors que les précédentes sont rouges et ne clignent pas
- Alarme répétitive réglable à 10, 15 ou 30 minutes ou totalement désactivée
- Contacts secs pour le monitoring à distance d'alarme de basse et haute pression sur une distance maximale de 10000'(3000m)

Les Spécifications :

Le système avertisseur central Nema-4 de la série Alert-2 est manufacturé par Amico et garanti pour cinq années.

Chaque module est commandé par microprocesseur et s'ajuste en place. Lorsque sélectionné, le mode «entretien» verrouille les alarmes; ce qui nécessite un réenclenchement lorsqu'une condition d'alarme est corrigée. Cette fonction permet de découvrir les problèmes relatifs à une mauvaise connexion de fils ou les problèmes relatifs à un équipement du réseau. Une lumière rouge du système avertisseur central Nema-4 identifiera la dernière alarme à survenir, en clignotant; alors qu'une condition d'alarme déjà identifiée ne se fera sentir que par une lumière rouge ne clignotant pas.

Une alarme à répétition, lorsqu'on la sélectionne, activera le grognard à des intervalles présélectionnés, si la condition d'alarme n'est pas corrigée.

En configuration standard, on y retrouvera 10 ou 20 légendes. Le système avertisseur central Nema 4 doit être de conception modulaire. En condition d'alarme, le grognard se fait entendre et une lumière DEL «ROUGE» s'allume. Pour taire le grognard, il suffit d'appuyer sur le bouton «ALARME SILENCE»; cependant, le module demeurera en situation d'alarme, jusqu'à ce que le problème soit corrigé.

Le système avertisseur central Nema 4 est un modèle à circuit fermé et à auto surveillance. Lorsqu'il est sous tension, une lumière «VERTE» l'indique. De plus, des boutons «ESSAI et ALARME SILENCE» sont facilement accessibles sous un couvercle à charnières, de sorte que l'on puisse mettre à l'essai et opérer le système.

On doit être en mesure de faire des mises à niveau sur place, de sorte que le système puisse interfacer avec le système de gestion de l'immeuble ou le système AIMS, en y ajoutant les éléments pertinents.


L'enceinte de fibre de verre et polyester moulue doit résister à des écarts de température et aussi aux agents chimiques nocifs; l'enceinte doit de plus démontrer une étanchéité et des propriétés physiques excellentes. L'étanchéité à l'eau et à la poussière est assurée par une garniture fait de mousse sans joint. Des supports de montage en polyester et des vis d'ancrage sont fournis avec chaque enceinte. La fenêtre à l'épreuve des égratignures est collée en place.

L'alimentation du système avertisseur central Nema 4 de la série Alert-2 de Amico est: 115 VAC à 220 VAC, 50 à 60 HZ.


Le système avertisseur central Nema 4 de Amico est conforme au code CSA, est reconnu cULus et obtempère au code NFPA-99.

Spécifications Techniques

Vue de haut

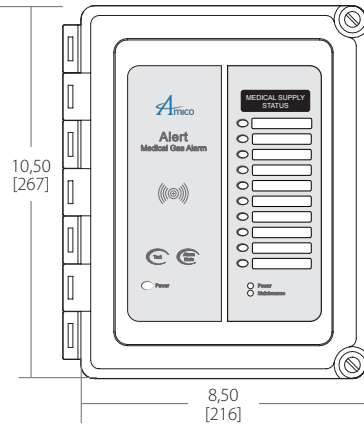


Vue de côté

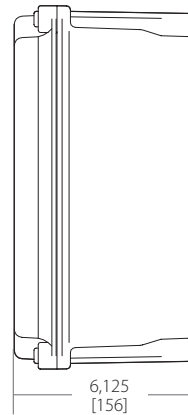


Pouce
[mm]

A2MN-E-10 → 6 lbs

Vue de haut

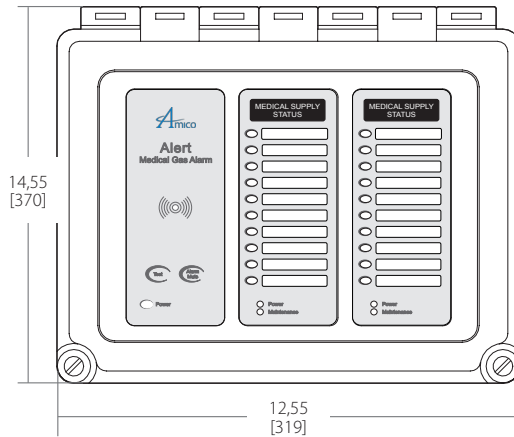

Vue de côté

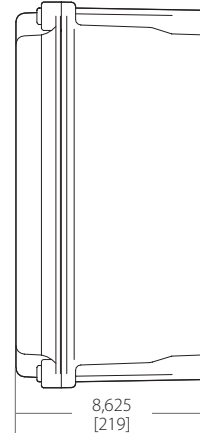

A2MN-E-20 → 15 lbs

Les Numéros de Modèles

A2MN-L-XX

La lettre "L" détermine la langue :

- E = Anglais
- F = Français
- S = Espagnol

Les lettres "XX" représentent le nombre de fonctions :

- 10 = 10 Fonctions
- 20 = 20 Fonctions

Représenté Par :

