

Alarma Master Ethernet LCD



Ethernet Listo para su uso



Características:

- La Alarma LCD estará en capacidad de mostrar una réplica exacta de la alarma en la pantalla de un computador a través de la Ethernet o Internet de la instalación. Adicionalmente, se podrá visualizar la imagen exacta de la alarma en un dispositivo móvil vía wifi.
- La Alarma LCD actualizará su estado cada segundo.
- Fácil acceso a través de la aplicación Amico Medas (Apple y Android).
- Web Audio Habilitado: Web Audio se activará cuando se produzca una alerta a través de Ethernet.
- Ilimitados registros de Alertas para realizar seguimiento del historial y encontrar una fácil solución de problemas.

Especificaciones Generales:

El Sistema de Alarma Master Ethernet LCD de Amico Pertenece a la Serie de Alerta-4 de Amico, complementada con una garantía de cinco años.

Cada Alarma LCD debe tener como base un microprocesador y podrá ser ajustada en el terreno.

Compatible con Ethernet para su visualización remota o inalámbrica desde cualquier lugar en la instalación.

Monitorea hasta 30 señales.

Cada canal debe ser etiquetado con un máximo de 16 caracteres por línea. Las condiciones de la Alarma se pueden seleccionar como: Normalmente abierta o Normalmente cerrada

Los canales se pueden agrupar o separar utilizando el Software de Configuración Master de Amico.

Cuando los canales se encuentren en condición normal, se illuminarán en verde

Cuando un canal se encuentre en condición de falla, se escuchará una alarma y se iluminarán en rojo tanto el encabezamiento del canal como el canal en falla. El encabezamiento mostrará el estatus del canal en falla.

Modo de Mantenimiento para facilitar la solución de problemas: mantenga presionado el botón de silencio por 20 segundos y la pantalla mostrará el puerto terminal para cada canal

La función de repetición de la alarma podrá encender el timbre nuevamente luego de un tiempo preestablecido, si la condición de falla no ha sido rectificada.

Contacto seco para conexion de monitoreo remoto.

La Alarma Master Ethernet LCD de Amico está lista para su uso con el Explorador de Internet y Google Chrome.


Los productos de Amico cumplen con NFPA 99, CSA Z7396.1 y CSA Z305.1.

Proyecto



Especificaciones Técnicas



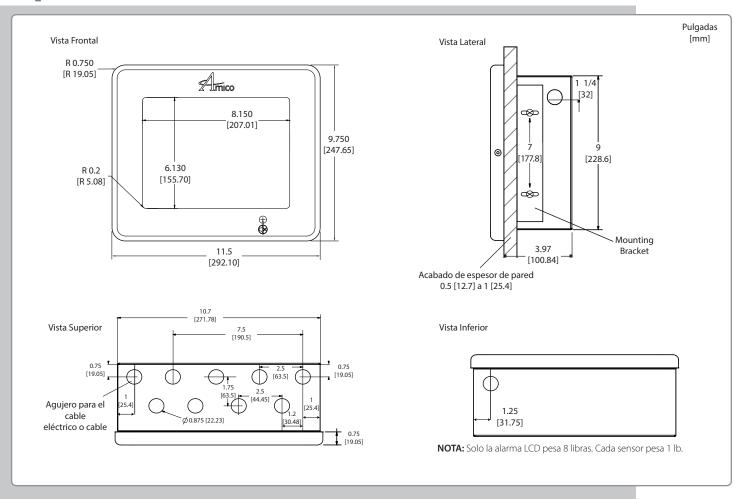

Números de los Modelos




Ejemplo:

Alarma LCD de 3 Gases (Oxígeno, Aire Medicinal & Vacío) = A4AR-S-OAV

Aplicación del Sistema Eco



Móvil de Amico

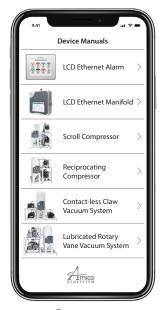





Características:

- · Correo electrónico y Mensaje de
- Fácil acceso vía Aplicación de Amico, lo que provee la tranquilidad de saber que la alarma estará siempre conectada

Descargas

Pantalla Real

Pantalla Real

Capacidad para enviar correos electrónicos y mensajes de texto en condición de falla. El correo electrónico y los mensajes de texto proporcionan la URL y la ubicación de la instalación para fácil acceso. Al hacer clic en la URL, aparecerá una imagen exacta de la pantalla desplegada en los dispositivos móviles.

La Aplicación del Sistema Eco Móvil de Amico está disponible para descarga en "App Store & Google Play". Esta aplicación proveerá una representación visual en forma instantánea y exacta de las condiciones de la alarma evitando llamadas de las enfermeras al personal de mantenimiento para localizar la interrupción y su rápida solución.

La Aplicación del Sistema Eco Móvil de Amico está disponible para descarga en "App Store & Google Play"



APLICACIÓN DEL SISTEMA ECO MÓVIL DE AMICO Descárguela ya!





Distribuido por:

3