

# Tensiómetro aneroide directo y canasta de brazaletes Amico

## Guía de instalación rápida

### Responsabilidad del personal médico

Se deben hacer revisiones de mantenimiento con frecuencia para conservar la calidad y el rendimiento de este producto. Cualquier pieza que se rompa, pierda, desgaste, deforme o contamine de cualquier manera no debe usarse, y todas las piezas afectadas deben ser reemplazadas de inmediato. Si se cree que hay una reparación necesaria, contacte a su distribuidor local Amico.



### Referencia de instalación

1. 1x Tensiómetro aneroide directo
2. 4x Tornillos autoperforantes de #8x1"
3. 4x Anclajes plásticos de pared
4. 1x Canasta de brazalete
5. 3x Tornillos autoperforantes de #8x1"
6. 3x Anclajes plásticos de pared de #6-8
7. 1x Clip de plástico para cable de 1/4"
8. 1x Brazalete y bomba de inflado, con manguera

### Herramientas de instalación



Destornillador #2 de punta Phillips



Taladro



Mecha de taladro de 1/8"

### Instalación en la pared

#### Paso 1

Con los tornillos y anclajes plásticos incluidos, fijar el soporte de pared a una superficie plana a la altura deseada.

#### Paso 2

Ensamblar el medidor en el soporte de pared. Ajustar usando un destornillador.

#### Paso 3

Con los tornillos y anclajes plásticos incluidos, acoplar la canasta a una superficie plana. La canasta se puede montar debajo o al lado del tensiómetro, según la preferencia del usuario y la disponibilidad de espacio.

#### Paso 4

Ensamblar con presión la punta "hembra" del ensamble de la bomba y el brazalete con la punta "macho" detrás de la cara del tensiómetro.

