

# Anéroïde à montage direct et panier de brassard

## Guide de démarrage rapide d'installation

### Responsabilité des établissements médicaux

Des contrôles de maintenance préventive doivent être effectués régulièrement pour assurer la qualité et les performances de ce produit. Toutes les pièces susceptibles d'être cassées, manquantes, usées, déformées ou contaminées de quelque manière que ce soit ne doivent pas être utilisées et toutes les pièces concernées doivent être remplacées immédiatement. Si vous soupçonnez qu'il faut effectuer une réparation ; veuillez contacter votre distributeur local.



### Référence d'installation

1. 1x Anéroïde à montage direct
2. 4x vis à tête #8x1 po
3. 4x Ancrages muraux en plastique
4. 1x Panier de brassard de tension artérielle
5. 3x vis à tête #8x1 po
6. 3x Ancrages muraux en plastique #6-8
7. 1x Clip en plastique pour fil 1/4 po
8. 1x Brassard et ampoule de tension artérielle, avec bobine

### Outils d'installation



#2 Tournevis cruciforme



Perceuse



1/8 po Foret

### Installation au mur

#### Étape 1

Fixez solidement le support mural à une surface plane à la hauteur souhaitée à l'aide des vis et des chevilles murales fournies.

#### Étape 2

Fixez la jauge d'horloge au support mural. Serrez solidement à l'aide d'un tournevis.

#### Étape 3

Fixez solidement le panier de brassard à une surface plane à l'aide des vis et des chevilles murales fournies. Le panier peut être monté sous ou à côté de l'anéroïde, en fonction des préférences de l'utilisateur final et de la disponibilité d'espace.

#### Étape 4

Ajustez par pression l'extrémité « femelle » de l'ensemble brassard et poire de tension artérielle sur l'embout « mâle » juste derrière la face anéroïde.

